

Przyłbica chroniąca twarz, przeznaczona do użytku indywidualnego.

Materiał: Przyłbica została wykonana wysokiej jakości folii PET, materiału dystansowego i gumy tkanej. Na przodzie przyłbicy znajduje się folia odbłaskowa poprawiająca widoczność i bezpieczeństwo użytkownika.

Folia PET: parametr przejrzystości LT 91%, parametr zamglenia 0,4%, posiada certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

Materiał dystansowy wykonany został z pianki polietylenowej, posiadającej atest higieniczny PZH.

Wymiary:

Model PO1S:	Model PO1L:
Rozmiar S/M	Rozmiar L/XL
szer. 33 cm	szer. 33 cm
wys. 20,5 cm,	wys. 23,5 cm,
waga 51,2g	waga 51,5g

Zastosowanie: Środek ochrony indywidualnej.

Ochrona użytkowników przed powierzchniowymi urazami mechanicznymi; czynnikami atmosferycznymi, które nie mają charakteru ekstremalnego.


Zapewnia podstawową ochronę użytkownika w miejscach, takich jak: przychodnie, sklepy, dworce, transport masowy, zakłady pracy itp. Idealna do pracy w sklepach, biurach obsługi klienta itp.

Skuteczność działania: Badania techniczne zapewniają optymalny poziom ochrony, wymagany w przewidywalnych warunkach użytkowania.

Zakładanie przyłbicy:




1. Przed dotknięciem przyłbicy umyj ręce wodą z mydłem lub preparatem na bazie alkoholu.

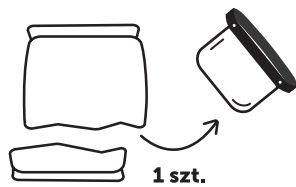

2. Wyciągnij przyłbicę z kartonu.



3. Przyłóż przyłbicę do czoła stroną wewnętrzną i naciągnij gumę na głowę

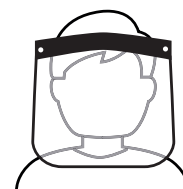

4. Bądź zdrowy. Bądź sobą.

Uwagi:

- Unikaj dotykania przyłbicy w czasie jej używania – gdy do tego dojdzie, należy dokładnie umyć ręce.
- Kiedy na przyłbicy zauważysz przetarcia lub pęknięcia czy inne uszkodzenia mechaniczne należy wymienić ją na nową.
- Przyłbica jest przeznaczona do wykorzystania przez jednego użytkownika.
- Przechowywanie: w czystym, suchym, bezpyłowym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.
- Czyszczenie: zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu.
- Utylizacja: zużytą przyłbicę należy zdezynfekować i wyrzucić do odpadów mieszanych.

Instrukcja użycia

Vitberg

dotyczy modelu:

PO1S

PO1L



Przyłbica ochronna Vitberg

Środek ochrony indywidualnej kategorii I

Deklaracja zgodności dostępna na:
[vitberg.com/images/dz_przylbica.pdf](https://www.vitberg.com/images/dz_przylbica.pdf)

Wytwórcą masek jest polski producent wyrobów medycznych

Vitberg

Vitberg Jacek Sikora
ul. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz



Poznaj nas bliżej



www.vitberg.com